

Original Bedienungsanleitung – AREBOS Duschhocker

AREBOS

Duschhocker

AR-HE-BH60004



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

Sicherheitshinweise

Symbolerklärung



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

Hinweise

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie, ob alle Bestandteile im Paket enthalten sind und ob das Produkt evtl. Transportschäden aufweist. Ist dies der Fall, wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Händleradresse.
- Achten Sie darauf, dass der Duschhocker stets fest und sicher auf allen vier Füßen steht.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Länge befinden.
- Besondere Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, besonders dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Duschockers gegeben ist.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen vergrößert werden.
- Falls Sie sich selbst nicht ausreichend halten können, bitten Sie eine Hilfsperson um Unterstützung.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Lieferumfang

- Sitzfläche
- 4 Stuhlbeine (teleskopisierbar)
- 4 Gummifüße
- Schrauben

Montage



Höhenverstellung der Stuhlbeine

- Durch Höhenverstellung der Stuhlbeine kann die Sitzhöhe der Person individuell angepasst werden. Sie müssen dazu den Federknopf am Stuhlbein an das Teleskoprohr drücken. Danach schieben Sie das Rohr in die gewünschte Position.



- **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet. **Sturzgefahr!**
- Prüfen Sie nach, ob alle Stuhlbeine auf der gleichen Höhe eingestellt sind.

Technische Daten

Material	Aluminium/HDPE
Farbe	Silber/weiß
Sitzbreite	ca. 50 cm
Sitztiefe	ca. 30 cm
Sitzhöhe	Bis ca. 52 cm verstellbar
Gewicht	2 kg
Max. Belastbarkeit	100 kg

Reinigung und Pflege

- Wir empfehlen den Duschhocker nach jeder Benutzung zu reinigen. Sie können den Badhocker mit einem feuchten Tuch abwischen, bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Um das Produkt zu desinfizieren können Sie ein handübliches Flächenreinigungsmittel verwenden.

Wartung

- Der Duschhocker ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Duschhocker defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Entsorgungshinweis

Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass Diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickengefahr!

Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: AREBOS Duschhocker

Artikelnummer: 4260199756560

Modellnummer: AR-HE-BH60004

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 CONCERNING MEDICAL DEVICES;
INCLUDING, AT 21 MARCH 2010, THE AMENDMENTS BY COUNCIL DIRECTIVE 2007/47/EEC

EN ISO 11199-2-2005

EN 980:2008

EN 1041:2008

EN/ISO 14971:2007

ISO-7173; ISO-11199-1; ISO-11334; ISO-7176-8

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 13.02.2019



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071